

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию геля универсального
«NEROGLIDE»

NEROGLIDE ЛУБРИКАНТ



1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Гель универсальный «NEROGLIDE»
ТУ 21.20.23-010-48162580-2023

Производитель: ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область,
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 86
Тел.: (4852) 59-30-10

2. Сфера применения

Гель предназначен для проведения ветеринарных процедур, для смазки акушерских инструментов и обработки рук специалистов при процедуре ИО, ректальных исследованиях КРС, проведения УЗИ и родовспоможении. Гель обеспечивает скольжение между трущимися поверхностями. После нанесения на поверхность сохраняет свои свойства не менее 15 минут. Гель легко наносится и хорошо смывается водой. Не обладает спермицидным эффектом, не раздражает кожу и слизистые оболочки, совместим с акушерскими перчатками из латекса и полиэтилена.

3. Инструкция по применению

Гель применяется местно и ректально. Доза определяется ветеринарным специалистом в зависимости от вида манипуляций. При необходимости гель смывается водой или удаляется бумажной салфеткой.

4. Состав

Гидроксиэтилцеллюлоза, карбомер, глицерин, регулятор pH, краситель голубой.

5. Меры предосторожности

Перед применением проконсультироваться со специалистом. Продукт пожаровзрывобезопасен. При попадании в глаза промыть водой.

6. Хранение

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0С до +25С. Срок хранения 36 месяцев со дня изготовления. Не замораживать.



ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область,
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 86
Тел.: (4852) 59-30-10